


Handleiding UriSWAB

STAP 1

urine verzamelen

Thuis bij de patiënt

Stroom methode

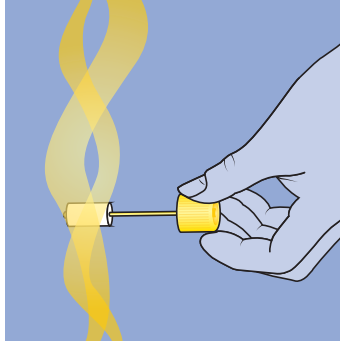

Het sponsje van de UriSWAB wordt even in de middenstroom urinestraal gehouden

Op de praktijk


Indoep methode



Het sponsje van de UriSWAB wordt in de reeds opgevangen middenstroom urine gedoopt

STAP 2

barcode plakken

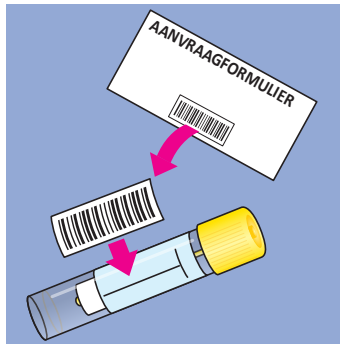

Draai de dop goed vast en plak de barcodesticker in de lengterichting op de UriSWAB

STAP 3

verzendklaar maken

- Noteer afnamedatum op ingevuld aanvraagformulier
- Stop UriSWAB in blister en vervolgens in de safetybag en plak deze dicht
- Doe de safetybag en het aanvraagformulier in de retourenvelop

STAP 4

verzenden

Kies uit één van de mogelijkheden:

- Meegeven aan de Certe-bode die dagelijks komt
- Door de patiënt naar een Certe-locatie laten brengen
- Verzenden via PostNL



CERTE

MEDISCHE DIAGNOSTIEK & ADVIES

ZEKER VOOR ZORG

Postbus 909 | 9700 AX Groningen | 088 - 23 70 100 | certe.nl | info@certe.nl

Tot Certe behoren de Stichtingen Certe Huisartsenlaboratorium Noord, Certe Inkoop, Certe Laboratorium voor Infectieziekten, Certe Medisch Laboratorium Noord, Certe Medisch Laboratorium OZG, Certe Noordelijke Laboratorium Groep en Certe Trombosedienst Groningen.