



INSTRUCTIE VOOR THUISPRIKKEN. HbA1c-bepaling

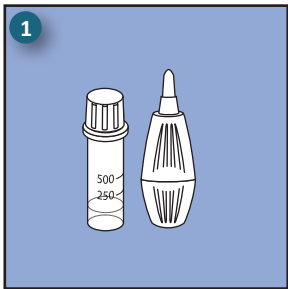


In de verpakking zit een


- buisje
- prikker
- tissue
- etiket
- aanvraagformulier

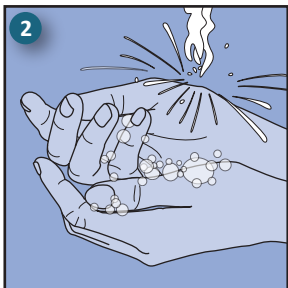


Was uw handen grondig.

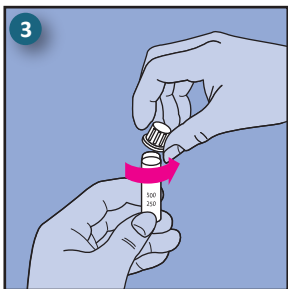


Verwijder het dopje van het buisje. Dopje niet weggooid, dit heeft u later weer nodig.

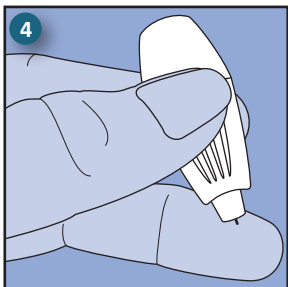


Prik een vinger aan met uw eigen of de meegeleverde naald door het dunne witte deel op uw vinger te zetten en dan het bovenste deel naar beneden te duwen.

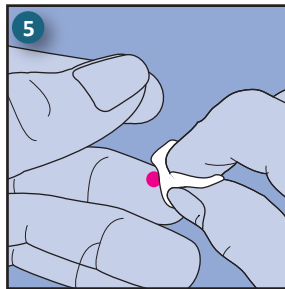


Veeg de eerste druppel weg met bijvoorbeeld een watje of een tissue.

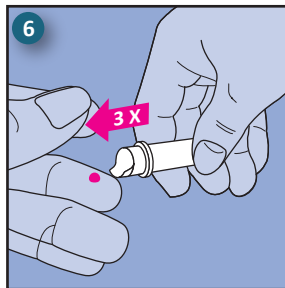


Schep met het tuitje 3 druppels bloed op.

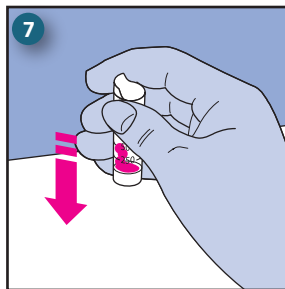





Tik met het buisje op een harde ondergrond, zodat het bloed in de onderste helft van het buisje zakt.

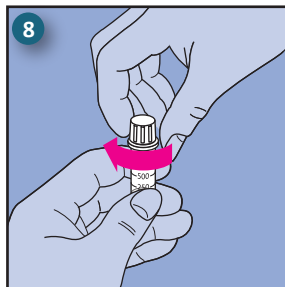

Sluit het buisje weer goed af met het dopje.

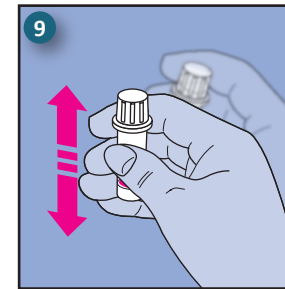

Schud het buisje om het bloed met het ontstollingsmiddel op de wand van het buisje te mengen.

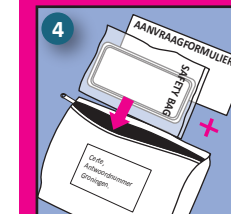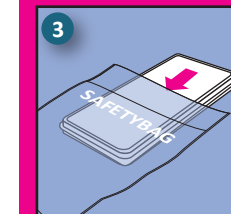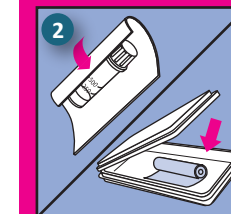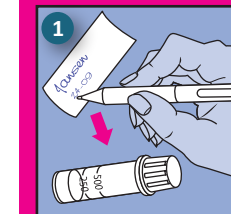

VERZENDING

Schrijf naam en geboortedatum op het bijgevoegde etiket en plak dit etiket op het buisje.

Omwikkel het buisje met het absorberende inlegvel.

Stop dit in de blister.

Stop de blister in de safetybag en plak deze dicht.

Doe de safetybag en het aanvraagformulier in de retourenvelop en rits deze dicht.

De retourenvelop sturen naar:

Certe
Antwoordnummer 9605
9700 WN Groningen

U kunt deze ook afgeven bij één van de dependances van Certe.