




1B : INSTRUCTIONS POUR L'ANALYSE D'URINE POUR DÉPISTAGE DE MST

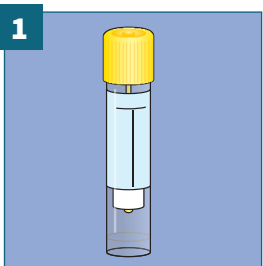


1 Dans l'emballage se trouve un flacon avec un bouchon jaune.

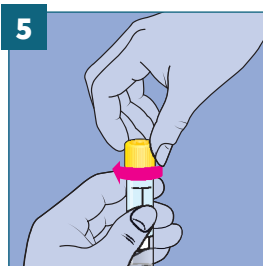


5 Revissez le bouchon en serrant bien.

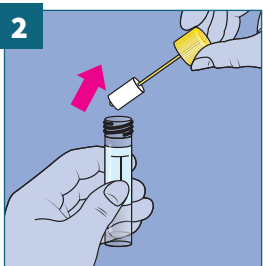

2 Dévissez le bouchon et retirez la tige portant de petites éponges.

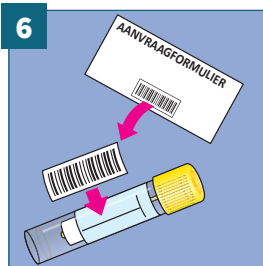


6 Collez l'étiquette avec le code barres sur le flacon dans le sens de la longueur. Écrivez la date du prélèvement sur le bon de commande.

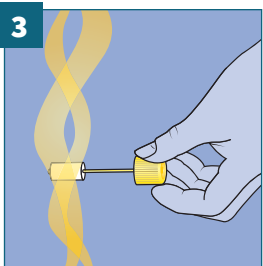

3 Utilisez de préférence l'urine du matin. En tout cas après ne pas avoir uriné pendant au moins une heure.


Placez les éponges sous le **premier jet** de l'urine. Finissez d'uriner dans les toilettes.

Attention : les éponges doivent être entièrement imbibées.

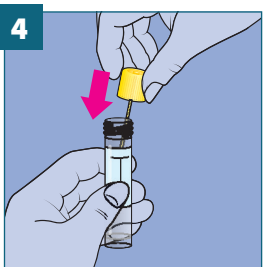


4 Remettez le manchon avec les éponges dans le flacon.


PRÉPARATION POUR L'ENVOI

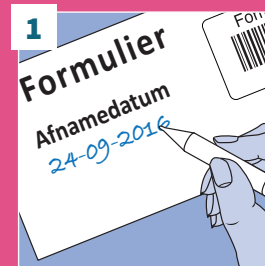


1 N'oubliez pas de remplir la date du prélèvement.

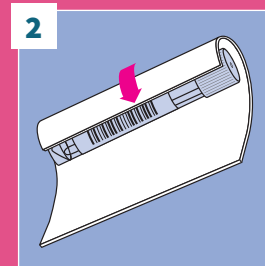

2 Entourez le flacon de la feuille absorbante.

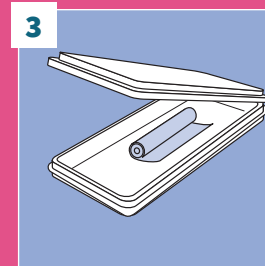

3 Placez-le dans l'emballage blister.

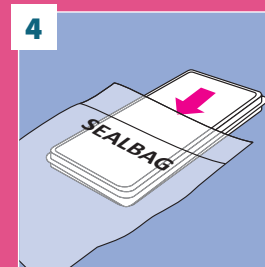

4 Mettez le blister dans le sachet étanche et refermez celui-ci.

Sur la face non imprimée du sachet étanche se trouve une poche supplémentaire, mettez-y le bon de commande.

Votre médecin de famille vous informe sur la remise du matériel.