



التجهيز للارسال


لا تنسى كتابة تاريخ أخذ العينة.

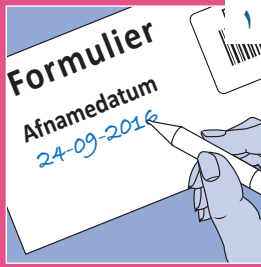

ضع الورقة التي تمتص حول القارورة الصغيرة.

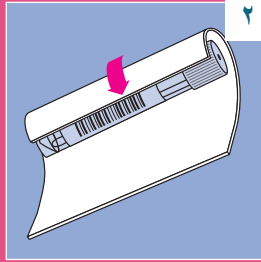


ضعها في علبة التغليف الصغيرة.

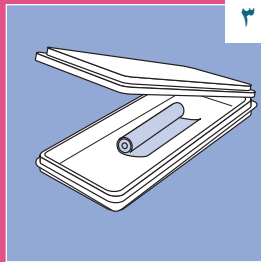

ضع علبة التغليف الصغيرة في الكيس البلاستيكي ثم اغلقه.


ضع الاستمارة في جيب صغير اضافي على الكيس البلاستيكي.

سيقدم لك طبيب العائلة الخاص بك معلومات عن تقديم المادة.

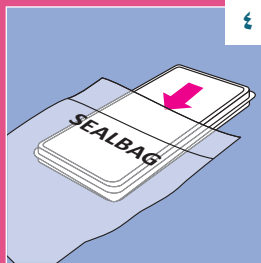


١٢: تعليمات بخصوص فحص البراز


الصق الستيكر (الاستمارة) على رسالة المريض والستيكر (مواد) على الانبوب يجب أن يكون الستيكر مع الباركود ملصقين على الانبوب.
اكتب تاريخ أخذ العينة على رسالة المريض.

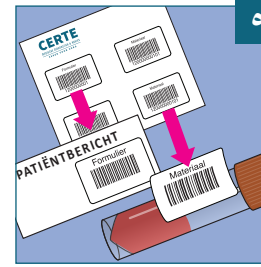


ماسك البراز المستخدم يمكن رميه مع الماء في المراض.

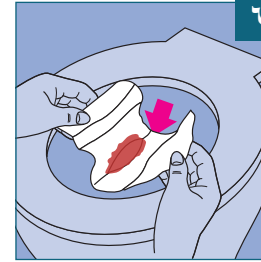

استخدم ماسك البراز لتجنب اختلاط مع ماء المراض اتبع التعليمات التي تخص التقاط البراز.

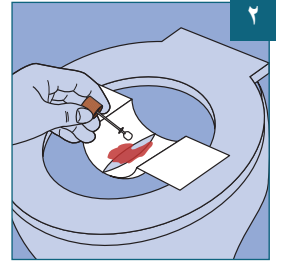

امل النبوب بالبراز حتى النصف (حد أقصى) استعمل هنا ماسك البراز والملقعة الصغيرة الموجودة مع السداد.

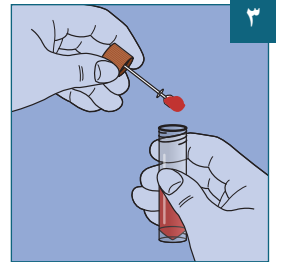

اغلق السداد بإحكام.

