



3B: INSTRUCTIES ONDERZOEK ANUS/ RECTUM-UITSTRIJK

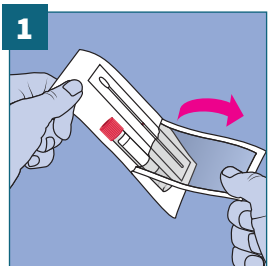


In de verpakking zit een
• wattenstokje
• buisje met transportvloeistof

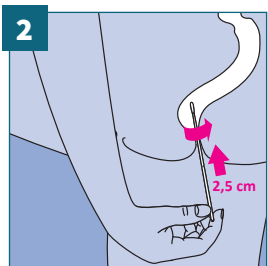


Breng het wattenstokje vervolgens
ongeveer 2,5 cm diep in de anus.


Wrijf de stok 5 -10 seconden tegen
de binnenkant van de anus (rectum).

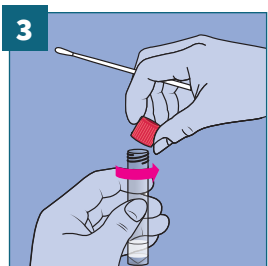


Open het buisje met transportvloeistof
en houdt het rechtop.

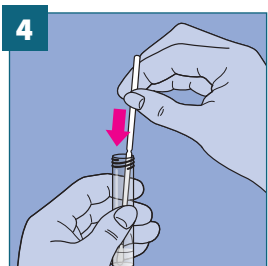


Breng na het maken van de uitstrijk
het wattenstokje tot op de bodem
van het transportbuisje.

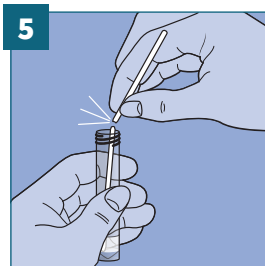

Breek bovenkant bij het gekleurde
breekpunt van het stokje af.

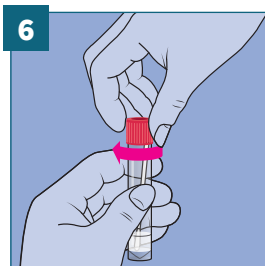


Draai de dop stevig vast.

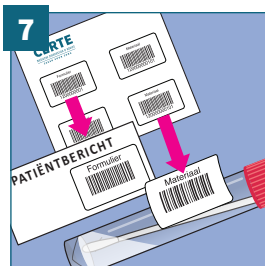


Plak de sticker 'formulier' op het
patiëntbericht en de sticker 'materiaal'
op het buisje. Zorg dat de sticker met de
barcode in de lengterichting op het buisje
wordt geplakt.

Schrijf de afnamedatum op het
patiëntbericht.


KLAARMAKEN VOOR VERZENDING

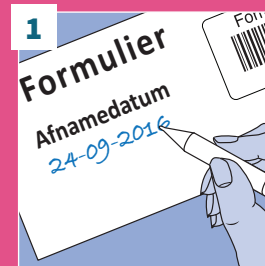


Vergeet niet de afnamedatum in te vullen.

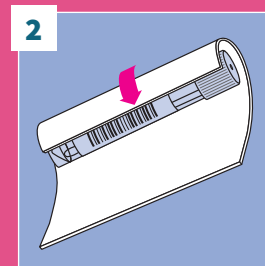

Omwikkel het buisje met het
absorberende inlegvel.

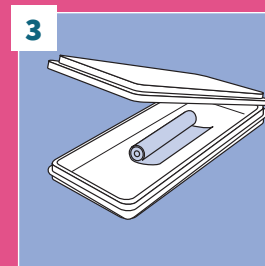

Stop dit in de blister.

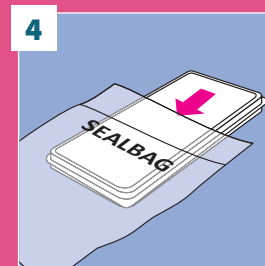

Stop de blister in de sealbag en
plak deze dicht.

Aan de onbedrukte zijde van de sealbag
zit een extra vakje, doe hier het aanvraag-
formulier in.

Uw huisarts geeft u informatie over het
inleveren van het materiaal.